

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия

Коллагеновые пластины для десен FARMADONT (ФАРМАДОНТ)

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13717 от 10.09.2012 г.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Стоматит, гингивит, пародонтит, альвеолит, глоссит.

Применение:

в составе комплексной терапии воспалительных, инфекционно-некротических, дистрофических заболеваний полости рта на любой стадии патологического процесса, а также для профилактики данных заболеваний, в том числе:

- после оперативного вмешательства на десне и тканях пародонта, включая закрытие дефекта после взятия лоскута;
- при травме десен и слизистой оболочки полости рта и носоглотки (ожоги, прикусывания); - после удаления зубного камня;
- до, в процессе и после протезирования зубов.

Коллагеновые пластины для десен FARMADONT (ФАРМАДОНТ):

- снимают кровоточивость;
- обеспечивают противовоспалительный эффект;
- оказывают антисептическое действие;
- стимулируют восстановление поврежденных тканей;
- обладают болеутоляющими свойствами.

Состав:

Коллаген, альгинат натрия, коллагеназа, вытяжки из лекарственных растений.

Возможны модификации пластин в зависимости от введенных в состав вытяжек из лекарственных растений:

- коллагеновые пластины для десен с маклеи экстрактом (Сангвиритрин), шалфея экстрактом (Сальвин), шиповника экстрактом, ромашки экстрактом (Ротокан) **FARMADONT I ПРИ ВОСПАЛЕНИЯХ В ПОЛОСТИ РТА (ФАРМАДОНТ I)**;
- коллагеновые пластины для десен с ромашки экстрактом (Ротокан), валерианы настойкой, арники настойкой, мяты настойкой **FARMADONT II ПРИ БОЛЕЗНЕННОСТИ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЕСЕН (ФАРМАДОНТ II)**;
- коллагеновые пластины для десен с зверобоя экстрактом, алоэ соком, подорожника соком **FARMADONT III ПРОТИВ КРОВОТОЧИВОСТИ ДЕСЕН (ФАРМАДОНТ III)**.

Коллаген – биосовместимый полимер натурального происхождения, является источником структурных компонентов для восстановления собственных тканей, полностью рассасывается, замещаясь грануляционной тканью.

Коллагеназа – природный фермент, способствует быстрому очищению гнойных ран от нежизнеспособных тканей и экссудата, предупреждает развитие грубых (типа келоидных) рубцов.
Альгинат натрия – природный полисахарид, получаемый из бурых морских водорослей,

содержит микроэлементы, обладает противовоспалительным, заживляющим и кровоостанавливающим действием.

Характеристика вытяжек из лекарственных растений.

Вытяжки из лекарственных растений	Основные активные компоненты	Действие
Маклеи экстракт (Сангвиритрин)	Изохинолиновые алкалоиды сангвинарин и хелеритрин	Антимикробная активность относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе антибиотикорезистентных штаммов), дрожжеподобных и мицелиальных грибов, патогенных простейших
Шалфея экстракт (Сальвин)	Эфирное масло, флавоноиды, дубильные вещества, витамины Р и РР	Противовоспалительное, противомикробное и вяжущее
Шиповника экстракт	Витамины С, Р, К, каротин, дубильные вещества, калий, железо, марганец, фосфор, кальций, магний	Сосудоукрепляющее, нормализация местного иммунитета
Ромашки экстракт (Ротокан)	Эфирное масло, флавоноиды	Противовоспалительное, антиоксидантное, спазмолитическое, противомикробное, улучшение процессов регенерации тканей
Валерианы настойка	Эфирное масло, дубильные вещества, флавоноиды	Болеутоляющее и успокаивающее
Арники настойка	Эфирное масло, флавоноиды, каротиноиды, фитостерины, витамин С	Ярко выраженное обезболивающее, дезинфицирующее, противовоспалительное и ранозаживляющее, снятие отечности
Мяты настойка	Эфирное масло	Спазмолитическое, антисептическое, дезодорирующее
Подорожника сок	Витамины С, А, К, дубильные вещества, слизи	Кровоостанавливающее, бактерицидное, ранозаживляющее, очищающее, вяжущее
Алоэ сок	Слизи, витамины С и Е, фитонциды, ферменты, растительные биогенные стимуляторы	Противовоспалительное, ранозаживляющее, антибактериальное, усиливает восстановительные процессы в поврежденных тканях
Зверобоя экстракт	Флавоноиды, дубильные вещества, эфирное масло	Вяжущее, противовоспалительное, смягчающее, антисептическое, кровоостанавливающее, обезболивающее

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллагеновые пластины для десен «FARMADONT» («ФАРМАДОНТ») представляют собой стерильные прямоугольные пластины губчатой структуры различных типоразмеров в мм: (35–45) × (5–12) × (4–7), с муаровым рисунком поверхности от бело-серого до бурого с зеленоватым или коричневатым оттенком цвета, со слабым специфическим запахом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость ингредиентов, входящих в состав. В случае возникновения аллергических реакций применение прекратить.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Внимательно изучить инструкцию по применению. Провести гигиену полости рта.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Соприкасаясь с влажной поверхностью, пластина фиксируется на ней и постепенно растворяется, высвобождая активные компоненты: фрагменты коллагена, коллагеназу и вытяжки лекарственных растений, обеспечивая выше заявленные свойства. Пластины полностью рассасываются и не требуют удаления.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Чистыми сухими (!) руками извлечь пластину из упаковки и аккуратно, слегка прижимая, приложить к десне или к другому поврежденному участку. Пластина сама фиксируется к влажной поверхности и растворяется в полости рта, в среднем, в течение часа (зависит от индивидуальных особенностей организма). Не рекомендуется принимать пищу и напитки до тех пор, пока пластины не растворятся.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применять на ночь или 2–3 раза в день в перерывах между приемами пищи. Рекомендуемый курс: от одной недели и более (в зависимости от интенсивности процесса). Применять до полного исчезновения симптомов.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от +4°C до +25°C. Беречь от детей.

Побочное действие: Не выявлено.

Взаимодействие: Случаи взаимодействия не описаны.

Срок годности: 3 года с даты стерилизации. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска: Без рецепта.

ТУ 9391–020–48783520–2012

Изготовитель: «Зеленая дубрава» ЗАО, Россия, 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151. Тел./факс: (496) 223-05-85, (495) 993-99-95. www.mazi.ru

Официальный дистрибьютор: «Премьер-продукт» ООО, Россия. Тел./факс: (495) 745-60-10.

Претензии принимаются: «Зеленая дубрава» ЗАО, Россия, 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151. Тел./факс: (496) 223–05–85, (495) 993–99–95. www.mazi.ru